



Rollstuhlzubehör

Unser Ideen helfen im Alltag

und mehr...

Gebrauchsanweisung

RUTSCHBRETT CURVY **CE**





Gebrauchsanweisung

1. Allgemeine Produktinformationen:

Bezeichnungen:	RUTSCHBRETT CURVY-H, RUTSCHBRETT CURVY SUPERSLIDE
Artikelnummern:	109010, 109020
Passend für:	Rollstühle mit abnehmbaren oder abklappbarem Seitenteil Maximale Reifenbreite 42 mm
Trägfähigkeit bei gleichmäßiger Belastung:	120 kg (Modell H) bzw. 130 kg (Modell SUPERSLIDE), bei je mindestens 15 cm Auflage an beiden Enden

Das RUTSCHBRETT CURVY-H bietet mit seiner wasserfest lackierten Holzoberfläche sehr gute Rutscheigenschaften. Das RUTSCHBRETT CURVY SUPERSLIDE ist mit einer grünen Beschichtung versehen, die die Rutschfähigkeit nochmals erhöht und durch die verbesserte Stabilität ein noch schlankeres Design erlaubt.

2. Zweckbestimmung/Einsatzbereich:

Das Rutschbrett Curvy erleichtert das Umsetzen vom Rollstuhl auf eine andere Sitzfläche (Bett, Toilette, etc.), ohne dafür aufstehen zu müssen. Durch die neuartige, leicht gebogene Form erfolgt das Umsetzen noch komfortabler als bei geraden Rutschbrettern. Je nach Kondition des Patienten erfolgt der Transfer selbstständig oder mit einer Hilfsperson. Üblicherweise werden Rutschbretter in der häuslichen Pflege, aber auch in Rehabilitationseinrichtungen, Krankenhäusern und im Altenpflegebereich eingesetzt.

3. Sicherheitshinweise:

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich und befolgen Sie alle Hinweise. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Überprüfen Sie das Rutschbrett vor der Nutzung auf Beschädigungen. Setzen Sie ein beschädigtes Rutschbrett auf keinen Fall mehr ein. Auch leichte Beschädigungen können das Umsetzen bereits beeinträchtigen, z.B. durch Hängenbleiben mit der Kleidung.
- Der Abstand zwischen der Sitzfläche des Rollstuhls und der Sitzgelegenheit, auf die umgesetzt werden soll, sollte höchstens 30 cm betragen. Achten Sie vor der Verwendung darauf, dass das Rutschbrett stabil und gerade mindestens 15 cm auf beiden Flächen aufliegt. Vermeiden Sie einen zu großen Höhenunterschied beider Flächen, da bei einer schrägen Auflage des Rutschbretts ein sicheres Umsetzen nicht gewährleistet werden kann. Ein Wegrutschen des Rutschbretts kann zu schweren Verletzungen führen!
- Achten Sie darauf, dass der Rollstuhl und gegebenenfalls auch die Sitzfläche, auf die umgesetzt werden soll, gegen Wegrollen bzw. Wegrutschen gesichert sind.
- Bitte nutzen Sie das Rutschbrett bekleidet und vermeiden Sie den Kontakt mit nackter Haut. Wählen Sie Kleidung, die Sie beim Umsetzen nicht beeinträchtigt.
- Wenn erforderlich, ziehen Sie eine Hilfsperson hinzu, die Ihnen das Umsetzen erleichtert. Bei Patienten, die ihr Gewicht nicht sicher kurzzeitig stabilisieren können, empfehlen wir grundsätzlich eine Aufsichtsperson. Halten Sie Rücksprache mit dem Arzt, um zu entscheiden, ob das Rutschbrett für den Patienten geeignet ist.
- Halten Sie das Rutschbrett von Zündquellen wie Kerzen und brennenden Zigaretten fern.

4. Hinweise zur Nutzung:

1. Vor der Nutzung lesen Sie sich bitte die komplette Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie unbedingt die oben stehenden Sicherheitshinweise.
2. Platzieren Sie das Rutschbrett mit der Aussparung so auf der Sitzfläche des Rollstuhls, dass der Greifreifen und das Rollstuhlrad in die speziell designte Nase passt (**Abb. 1**). Achten Sie darauf, dass das Rutschbrett stabil auf beiden Sitzflächen aufliegt.
3. Rutschen Sie nun über das Rutschbrett auf die zweite Sitzfläche. Nehmen Sie dabei gegebenenfalls die Arme zur Hilfe.
4. Nachdem Sie auf der zweiten Sitzfläche angekommen sind, heben Sie bitte das Gesäß leicht an, um das Rutschbrett hervorzuziehen.



Abb. 1:

Platzierung des Rutschbretts Curvy-Superslide am Rollstuhlrad.

Achten Sie auf den stabilen Sitz des Rutschbretts auf beiden Auflageflächen!

5. Reinigung, Pflege, Lagerung und Wartung:

Die Reinigung des Rutschbretts kann mit Wasser unter Verwendung einer milden Seifenlauge erfolgen. Verwenden Sie dafür ein weiches Tuch. Setzen Sie zur Reinigung keinerlei aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel und auch keine Scheuerschwämme oder Bürsten ein. Verwenden Sie keine Dampfreiniger und keine konzentrierten Säuren und Laugen. Die Lackierung des RUTSCHBRETTs CURVY-H und die Beschichtung des RUTSCHBRETTs CURVY SUPERSLIDE weisen in Tests eine gute chemische Beständigkeit gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln auf. Beachten Sie bei der Wahl des geeigneten Desinfektionsmittels auch die Angaben des jeweiligen Herstellers. Vor dem Wiedereinsatz bei einem anderen Patienten sollte eine gründliche Reinigung und Desinfektion erfolgen. Bewahren Sie das Rutschbrett möglichst in geschlossenen Räumen bei normaler Umgebungstemperatur auf. Obwohl im Nassbereich einsetzbar, empfehlen wir die längerfristige Lagerung in trockener Umgebung. Überprüfen Sie, wie in den Sicherheitshinweisen angegeben, das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Ein beschädigtes Produkt darf nicht mehr verwendet werden. Die konkrete Lebensdauer des Produkts hängt sehr stark davon ab, welchen Einflüssen dieses im Laufe der Zeit ausgesetzt ist. Luftfeuchtigkeit, langfristige Sonneneinstrahlung, chemische Substanzen, unachtsamer Umgang können sich negativ auf die Lebensdauer auswirken. Auch bei äußerlicher Unversehrtheit empfehlen wir den Austausch der Rutschbretter nach spätestens 5 Jahren.

6. Technische Daten:

Rutschbrett Curvy H:

Gewicht: 1700 g
Größe: ca. 785 x 270 x 12 mm
Farbe: natur
Material: Multiplex Schichtsperrholz (Birke), wasserfest verleimt und lackiert

Rutschbrett Curvy-Superslide:

Gewicht: 1580 g
Größe: ca. 780 x 270 x 11 mm
Farbe: grün (Kanten natur)
Material: Multiplex Schichtsperrholz (Birke), wasserfest verleimt, mit einer Beschichtung auf Basis härtbarer Harze, Kanten wasserfest lackiert

7. Entsorgung:

Die Rutschbretter der CURVY-Modellreihe können wie kleine Mengen Möbelholz im Restmüll entsorgt werden. Die Gewährleistung für dieses Produkt auf Material- und Verarbeitungsfehler beträgt in Verbindung mit dem Kauf-/Lieferbeleg 12 Monate. **Schäden durch unsachgemäße Behandlung sind hiervon ausgenommen.** Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden MPB-Rutschbretts CURVY und muss daher aufbewahrt werden. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.

Als Zubehör zu einem Medizinprodukt der Klasse I trägt dieses Produkt eine CE-Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 2017/745. Dieses Produkt entspricht den auf das Produkt anzuwendenden regulatorischen Anforderungen. Bitte melden Sie im Zusammenhang mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfälle umgehend uns und den zuständigen Behörden.