



# ROLLATORSCHIRM LG 25

Der beste Schirm für DIETZ TAIMA, DRIVE TORRO, RUSSKA ELAN, TRENDMOBIL OMNI und SILVA, DOLOMITE JAZZ und andere 25 mm-Rollatoren mit senkrechter Befestigung

**! Bitte diese Montageanleitung mit Sicherheitshinweisen unbedingt vor Montage lesen und beachten!**

**! Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Verpackungstüte von Säuglingen und Kleinkindern fern!**


Alle Original-MPB-Rollatorschirme schützen Sie optimal vor Regen und Sonne, sie blockieren die schädliche UV-Strahlung nahezu vollständig. Das patente Air-Vent-System sorgt für eine weitgehende Entlastung und zusätzliche Stabilität bei windigem Wetter. Mit unserem Befestigungskloben LG 25 für Rundrohre mit 25 mm Durchmesser können die MPB-Rollatorschirme an gängige Leichtgewicht-Rollatoren wie **DIETZ TAIMA, DRIVE TORRO, RUSSKA ELAN** etc. senkrecht montiert werden. Der lange Einsteckzapfen des Schirms ermöglicht die problemlose Montage bei Rollatoren mit hoch aufbauender Bremse. Der neue Flügelgriff ermöglicht eine besonders einfache Bedienung des Schirmklobens.

**Inhalt der Verpackung:** Rollatorschirm (Abb. 1), vormontierter Befestigungskloben (Abb. 2)



**Abb. 1: Rollatorschirm**

- 1a – Verstellring
- 1b – Verstellgelenke

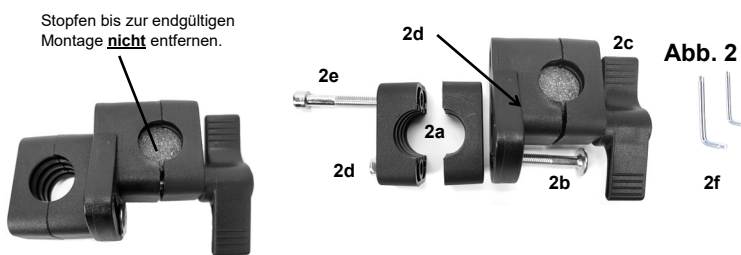

**Abb. 2: Befestigungskloben LG 25**

Links sehen Sie den fertig montierten Befestigungskloben für Leichtgewicht-Rollatoren mit 25 mm Rohrdurchmesser.

- 2a – Schelle 25 mm
- 2b – Flachkopfschraube M6 x 45 mm
- 2c – Flügelgriff mit Mutter
- 2d – Sicherungsmutter
- 2e – Schraube M6 x 40 mm
- 2f – Sechskantschlüssel SW5 und SW4

**Montieren Sie die Halterung bitte so hoch wie möglich direkt unterhalb des Bremsgriffs!**

**Senkrechte Montage der Halterung an Leichtgewicht-Rollatoren mit 25 mm Rohrdurchmesser:**



Die Schelle 2a um das Ausziehrrohr legen.

Den Halter und die Schelle 2a mit Schrauben 2b und 2e verbinden.

Mit Sechskantschlüssel anziehen.

Den Halter mit der Schraube 2b verbinden.

Der Griff 2c sollte nach außen zeigen!



Der Schirm sollte möglichst senkrecht stehen.

Ebenfalls mit Sechskantschlüssel anziehen.



Der Kloben ist fertig montiert.

Nun kann der graue Stopfen entfernt werden.



Anschließend den Schirm einsetzen.



Abb. 3



### Abb. 3: Ausgeklappter und geöffneter Rollatorschirm

Nachdem Sie den Schirm mit den Verstellgelenken **1b** in die gewünschte Position gebracht haben, können Sie ihn öffnen.

Eine Videoanleitung für die grundsätzliche Bedienung der MPB-Rollatorschirme finden Sie auch unter [www.youtube.com](http://www.youtube.com) unter dem Stichwort: „MPB Rollatorschirm“!

#### Bedienung des Schirms:

1. Stecken Sie den Schirm in die Halterung. Mit dem Verstellring (**1a**) können Sie die von Ihnen gewünschte Höhe einstellen und den Schirm sichern.
2. Durch Drücken der grauen Verstellknöpfe an den Knickgelenken (**1b**) können Sie den Schirm in verschiedene Positionen bringen. Durch leichte Drehung des Einsteckzapfens in der Klemmeinheit kann die Position des Schirmes zusätzlich verändert werden. Lösen Sie dazu das Handrad und drehen es nach dem Verstellen wieder fest. Im optimalen Fall sollte die Schirmstange direkt rechts oder links neben Ihrem Gesicht verlaufen.
3. Öffnen Sie die Klettgurte der Schirmbespannung und drücken Sie den Öffnungsknopf des Schirmes. Der Schirm öffnet sehr schnell – bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!
4. Möchten Sie den Schirm einklappen, so verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge. Rollen Sie nur vollständig getrocknete Schirme wieder ein.

#### SICHERHEITSHINWEISE:

Der Schirm muss so angebracht werden, dass der Faltmechanismus des Rollators oder Rollstuhles und die Funktion wichtiger Teile wie zum Beispiel der Bremsen nicht eingeschränkt werden.

Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren.

Der Schirm öffnet sich sehr schnell automatisch auf Knopfdruck. Halten Sie ihn vom Körper entfernt und achten Sie auf andere Personen in der Nähe, um Verletzungen zu vermeiden.

Beim Öffnen und bei geöffnetem Schirm besteht Verletzungsgefahr anderer durch die äußeren Schirmspitzen an den Enden der Schirmbespannung. Beim Einklappen des Schirmes und des Halters in umgekehrter Reihenfolge besteht konstruktionsbedingt Klemmgefahr für die Finger in den Knickgelenken.

Mit einem Rollatorschirm nehmen Sie mehr Raum ein, auch dann, wenn der Schirm ausgeklappt, aber nicht geöffnet ist. Beachten Sie bei geöffnetem Schirm, dass Sie mit diesem seitlich rechts und links hängen bleiben können. Achten Sie auch auf die Gesamthöhe, damit Sie nicht z.B. mit ausgefahrenen Markisen kollidieren. Vor dem Einfahren in Gebäude ist der Schirm zu schließen und herunterzuklappen.

Jeder Schirm bietet dem Wind eine enorme Angriffsfläche. Benutzen Sie daher den aufgespannten Rollatorschirm bzw. Rollstuhlschirm auf keinen Fall bei Wind und Böen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie der aufgespannte Schirm beim Fahren mit dem Rollator bzw. Rollstuhl negativ beeinflusst, so klappen Sie den Schirm sofort wieder ein, um Unfälle zu vermeiden.

Klappen Sie den Schirm bei Nichtgebrauch ein. Sichern Sie die hochwertige, trockene Stoffbespannung des Schirmes durch Eindrehen und Schließen des Klettverschluss-Bandes und Nutzung der Schirmhülle. Achten Sie darauf, dass der Schirm nicht an Gegenständen und Hindernissen schleifen kann.

Achten Sie bei der Benutzung stets auf ein gut einsehbares, freies Sichtfeld. Behindern Sie andere Fußgänger und Verkehrsteilnehmer nicht. Bevor Sie den Schirm zum ersten Mal bei Regen benutzen, üben Sie bitte das Öffnen und Schließen mehrfach in „Trockenübungen“. Rollen Sie nur vollständig getrocknete Schirme ein und ziehen dann die Schirmhülle über, da es ansonsten zu Stockflecken und/oder Verfärbungen der Bespannung kommen kann.

Vermeiden Sie den Kontakt des Schirms zu Gefahrenquellen wie Sträuchern, Hecken, Zäunen, Zigaretteglut etc., da die Schirmbespannung dadurch beschädigt werden kann.

Vermeiden Sie jeglichen Scheuerkontakt, auch an Halterungsschraube, Griff der Höhenverstellung, Rollatorrahmen und Rädern.

Dieser Artikel darf in defektem Zustand nicht mehr eingesetzt werden. Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann vorgenommen werden. Bei nicht mit uns abgestimmten Veränderungen am Produkt erlischt das Recht auf Gewährleistung!

Diese Anleitung ist Bestandteil jedes MPB-Rollatorschirms und muss aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte ist diese Anleitung mitzugeben. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.