

⚠ Bitte diese Montageanleitung mit Sicherheitshinweisen unbedingt vor Montage lesen und beachten!

⚠ Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Verpackungstüte von Säuglingen und Kleinkindern fern!

Vielen Dank für den Kauf Ihres MPB-Rollatorschirms aus Bielefeld. Wenn Sie genau nach der vorliegenden Montageanleitung vorgehen, können Sie uneingeschränkt auf die beste Qualität und einfachste Handhabung dieses Original-Produktes vertrauen.

Alle Original-MPB-Rollatorschirme schützen Sie optimal vor Regen und Sonne, sie blockieren die schädliche UV-Strahlung nahezu vollständig. Das patente Air-Vent-System sorgt für eine weitgehende Entlastung und zusätzliche Stabilität bei windigem Wetter. Mit unserem Kloben R2 können die MPB-Rollatorschirme an Rollatoren mit großprofiligen Ovalrohren (ca. 48 x 22 mm) montiert werden, z.B. **B+B ALEVO** bzw. **CAPERO**, **KEHA BUTTERFLY**, **TRENDMOBIL LR-X** und Ovalrohr-Rollatoren von **ANTAR**, **ANTEAMED**, **AREBOS**, **DUNIMED**, **FRIPAC**, **HELAVO**, **JAGO**, **JUSKYS** und **RIDDER** und ähnliche.

Inhalt der Verpackung: Rollatorschirm (Abb. 1), vormontierter Befestigungskloben (Abb. 2), Zubehörbeutel mit Befestigungsmaterial (Abb. 3).



Abb. 1

Abb. 1: Rollatorschirm

Schirmstange mit zwei Verstellgelenken, Schirm und Schirmhülle
1a: Verstellung
1b: Verstellgelenke

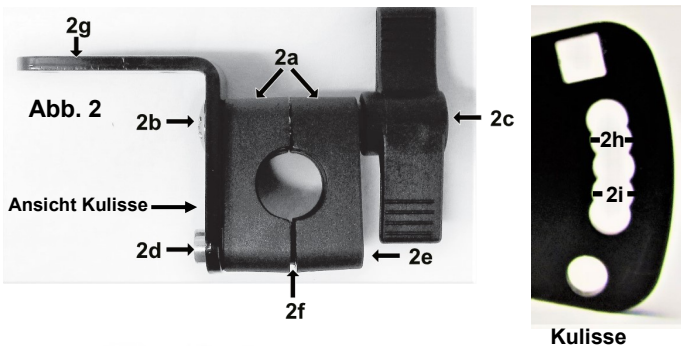


Abb. 2: Vormontierter Befestigungskloben

Der Kloben ist vormontiert für die Montage rechts 7°.

- 2a: Schelle 20 mm
- 2b: Schlossschraube M6 x 55
- 2c: Flügelgriff mit Mutter
- 2d: Innensechskantschraube M6 x 70
- 2e: Sicherungsmutter M6
- 2f: Kunststoff-Unterlegscheibe
- 2g: Befestigungswinkel
- 2h: Position der Schraube in der Kulisse 7° rechts (Lieferzustand)
- 2i: Position der Schraube in der Kulisse 7° bei Montage links

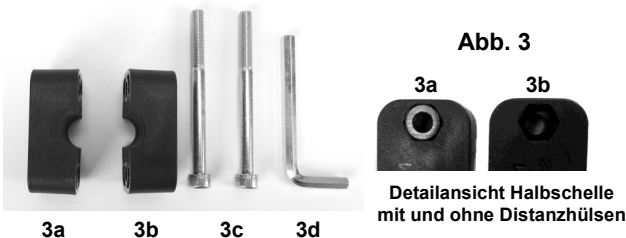


Abb. 3

Abb. 3: Zubehörbeutel mit Befestigungsmaterial

- 3a: 1 x Halbschelle 12,7 mm mit eingesetzten Distanzhülsen
- 3b: 1 x Halbschelle 12,7 mm ohne zusätzliche Distanzhülsen
- 3c: 2 x Innensechskantschraube M6 x 70 mm
- 3d: 1 x Einwegschlüssel SW5

Der Befestigungskloben ist werkseitig so vormontiert, dass Sie ihn auf der rechten Seite eines Rollators mit etwa 7°-Rohrneigung anbringen können (Innensechskantschraube in Position 2h, Abb. 2). Wenn Sie den Kloben auf der linken Seite anbringen wollen, so müssen Sie die Innensechskantschraube (2d) in der Kulisse auf Position 2i versetzen. Wenn Sie einen Rollator mit anderer Rohrneigung haben, können Sie die Schraube auf eine andere Position in der Kulisse versetzen. Der eingesetzte, geöffnete Schirm sollte waagrecht bzw. die Schirmstange senkrecht stehen.

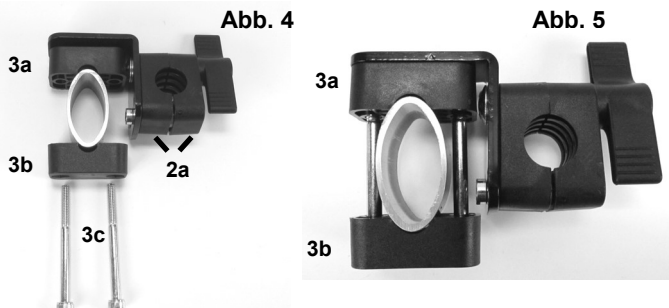


Abb. 4

Abb. 5

Abb. 4: Montage von Kloben R2 am Rollatorrohr

Montieren Sie den Kloben wie gezeigt mit Halbschelle 3a an der Innenseite des Befestigungswinkels und Halbschelle 3b an der gegenüberliegenden Seite des Rohrs.

Abb. 5: Fertig montierter Kloben

Der Kloben ist so wie gezeigt fertig montiert. Achten Sie darauf, dass die Aufnahme für den Schirm (Schelle 2a) an der Außenseite des Rollators angebracht ist.

Entnehmen Sie die Schellen und Schrauben aus dem Zubehörbeutel. Die Halbschelle 3a enthält werkseitig eingesetzte zusätzliche Distanzhülsen. Diese Hülsen sollen in der Schelle verbleiben, da sie den stabilen Sitz der Halterung gewährleisten. In der Halbschelle 3b (ohne Distanzhülsen) verschwinden die Schraubenköpfe. Montieren Sie die Halbschelle 3a wie in Abb. 4 und 5 gezeigt an der Innenseite des Befestigungswinkels. Die Halbschelle 3b sitzt an der gegenüberliegenden Seite des Rohrs. Die beiden Schrauben 3c sollten nach der Montage gleich weit aus dem schwarzen Winkel heraussehen. Ziehen Sie die Schrauben gut fest und ziehen Sie sie nach ca. 2 Tagen nach. Die Aufnahmeschelle für den Schirm (2a) sitzt immer an der Außenseite des Rollators. Die Halterung sollte so weit oben wie möglich unterhalb des Bremsgriffs montiert werden. Falls Sie die Innensechskantschraube 2d am Kloben versetzt haben, um den Schirm an einen Rollator mit Rohrneigungen von z.B. 12,5° oder 0° einzusetzen, denken Sie bitte unbedingt daran, die naturfarbene Unterlegscheibe (2f) wieder zwischen die Halbschellen zu legen. Das erleichtert Ihnen das Einstecken des Schirmgestänges.

ROLLATORSCHIRM R2

Abb. 6

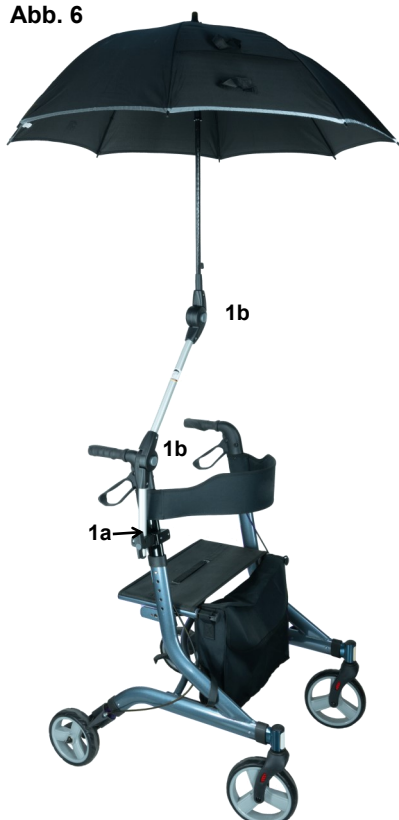


Abb. 6: Ausgeklappter und geöffneter Rollatorschirm

Nachdem Sie den Schirm mit den Verstellgelenken **1b** in die gewünschte Position gebracht haben, können Sie ihn öffnen.

Bedienung des Schirms:

1. Nach dem Einstecken der Schirmstange in die Aufnahmeschelle **2a** der Halterung können Sie durch Umsetzen des Verstellrings (**1a**) die von Ihnen gewünschte Höhe einstellen und den Schirm sichern.
2. Durch Drücken der grauen Verstellknöpfe an den Knickgelenken (**1b**) können Sie den Schirm in verschiedene Positionen bringen. Sie sichern den Schirm durch Festziehen des Flügelgriffs (**2c**). Möchten Sie die Position des Schirms durch leichte Drehung des Einsteckzapfens in der Klemmeinheit verändern, so lösen Sie dazu das Handrad (**2c**) und drehen es nach dem Verstellen wieder fest. Im optimalen Fall sollte die Schirmstange direkt rechts oder links neben Ihrem Gesicht verlaufen.
3. Entfernen Sie die Schirmhülle und öffnen Sie die Klettgurte der Schirmbespannung. Nach Drücken des Öffnungsknopfs öffnet sich der Schirm sehr schnell – bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!
4. Möchten Sie den Schirm einklappen, so verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge. Rollen Sie nur vollständig getrocknete Schirme wieder ein.

SICHERHEITSHINWEISE:

Der Schirm muss so angebracht werden, dass der **Faltmechanismus des Rollators oder Rollstuhls und die Funktion wichtiger Teile (z.B. Bremsen) nicht eingeschränkt werden.**

Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren.

Der Schirm öffnet sich sehr schnell automatisch auf Knopfdruck. Halten Sie ihn vom Körper entfernt und achten Sie auf andere Personen in der Nähe, um Verletzungen zu vermeiden.

Beim Öffnen und bei geöffnetem Schirm besteht Verletzungsgefahr anderer durch die äußeren Schirmspitzen an den Enden der Schirmbespannung. Beim Einklappen des Schirmes und des Halters in umgekehrter Reihenfolge besteht konstruktionsbedingt Klemmgefahr für die Finger in den Knickgelenken.

Mit einem Rollatorschirm nehmen Sie mehr Raum ein. Beachten Sie bei geöffnetem Schirm, dass Sie mit diesem seitlich rechts und links hängen bleiben können. Achten Sie auch auf die Gesamthöhe, damit Sie nicht z.B. mit ausgefahrenen Markisen kollidieren. Vor dem Einfahren in Gebäude ist der Schirm zu schließen und herunterzuklappen.

Jeder Schirm bietet dem Wind Angriffsfläche. Benutzen Sie daher den aufgespannten Schirm auf keinen Fall bei Wind und Böen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie der aufgespannte Schirm beim Fahren mit dem Rollator bzw. Rollstuhl negativ beeinflusst, so klappen Sie den Schirm sofort wieder ein, um Unfälle zu vermeiden.

Klappen Sie den Schirm bei Nichtgebrauch ein. Sichern Sie die hochwertige, trockene Stoffbespannung des Schirmes durch Eindrehen und Schließen des Klettverschluss-Bandes und Nutzung der Schirmhülle. Achten Sie darauf, dass der Schirm nicht an Gegenständen und Hindernissen schleifen kann.

Achten Sie bei der Benutzung stets auf ein gut einsehbares, freies Sichtfeld. Behindern Sie andere Fußgänger und Verkehrsteilnehmer nicht. Bevor Sie den Schirm zum ersten Mal bei Regen benutzen, üben Sie bitte das Öffnen und Schließen mehrfach. Rollen Sie nur vollständig getrocknete Schirme ein und ziehen dann die Schirmhülle über, da es ansonsten zu Stockflecken und/oder Verfärbungen der Bespannung kommen kann.

Vermeiden Sie den Kontakt des Schirms zu Gefahrenquellen wie Sträuchern, Hecken, Zäunen etc., da die Schirmbespannung dadurch beschädigt werden kann.

Vermeiden Sie jeglichen Scheuerkontakt, auch an Halterungsschraube, Griff der Höhenverstellung, Rollatorrahmen und Rädern.

Dieser Artikel darf in defektem Zustand nicht mehr eingesetzt werden. Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-MPB-Ersatzteilen durch einen Fachmann vorgenommen werden.