



MPB Rollstuhlzubehör

Unser Ideen helfen im Alltag

und mehr...

Gebrauchsanweisung

HALBER THERAPIETISCH 8 KLAPPBAR

CE





Gebrauchsanweisung

1. Allgemeine Produktinformationen

Bezeichnung:	HALBER THERAPIETISCH 8 KLAPPBAR
Artikelnummer:	107400
Passend für:	alle Rollstühle, an die eine Universal-Armlehne montiert werden kann, nur bedingt geeignet für Rollstühle mit höhenverstellbarer Armlehne
Trägfähigkeit:	2 kg

Der Therapietisch wird über die mitgelieferte Armlehne fest am Rollstuhl montiert und ist abklappbar. Dadurch wird dem Patienten eine große Bewegungsfreiheit ermöglicht

2. Zweckbestimmung/Einsatzbereich:

Der Therapietisch dient dem Benutzer von Rollstühlen, Sitzschalen und Sitzschalenrollstühlen als Ablagefläche während der Mahlzeiten, der Arbeit, bei Therapien und im Spiel. Der Therapietisch kann sowohl rechts als auch links montiert werden und lässt durch die Klappbarkeit mehr Bewegungsfreiheit zu als andere Therapietische. Üblicherweise wird der Therapietisch in Rehabilitationseinrichtungen, Krankenhäusern und im Altenpflegebereich unter Aufsicht von Fachpersonal eingesetzt.

3. Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich und befolgen Sie alle Hinweise. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Nutzen Sie den Therapietisch ausschließlich an Rollstühlen oder Sitzschalen mit festen Armlehnen. Die Montage muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Vor jeder Verwendung ist der feste Sitz des Therapietisches zu kontrollieren und der Tisch auf Beschädigungen zu prüfen. Nutzen Sie kein beschädigtes Produkt.
- Die Therapietischplatte besteht aus hochfestem PET-G, so dass Brüche bei sachgemäßer Anwendung nahezu ausgeschlossen sind. Eine ungleichmäßige Belastung des Tisches oder eine Überlastung über die zulässige Tragfähigkeit hinaus kann dennoch zu Brüchen führen. Achtung: Eine gebrochene Platte kann bei dem Patienten zu schweren Verletzungen führen!
- Beachten Sie bei der Montage mögliche Quetschgefahren für den Patienten und eine mögliche Behinderung der Atmung durch falsch und zu eng eingestellte Tischplatten. Achten Sie besonders auf Patienten, die nicht mehr in der Lage sind, ihr Missempfinden auszudrücken.
- Auch bei korrekter Einstellung des Tisches können durch Vornüberkippen des Patienten Beeinträchtigungen der Atmung auftreten. Wir empfehlen den Einsatz des Therapietisches unter Aufsicht von geeignetem Fachpersonal. Bitte befragen Sie den behandelnden Arzt, ob es Gegenanzeigen gegen die Verwendung des Tisches gibt.
- Wenn der Rollstuhl mit montiertem Tisch bewegt wird, müssen lose Gegenstände auf dem Tisch durch geeignete Maßnahmen fixiert werden (z.B. durch Antirutsch-Matten, Saugnäpfe oder Klettbefestigungen). Achten Sie besonders auf heiße Flüssigkeiten, da für den Patienten Verbrühungsgefahr besteht!
- Bei möglichen Kollisionen besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen oder Quetschen.
- Nutzen Sie den fest montierten Therapietische auf keinen Fall beim Behinderten-Transport in Fahrzeugen. Es besteht Verletzungsgefahr. Verstauen Sie den Therapietisch separat und montieren sie ihn nach der Ankunft wieder neu.
- Das Material der Tischplatten ist schwer entflammbar, kann aber dennoch brennen bzw. „kokeln“. Halten Sie den Therapietisch deshalb von Zündquellen wie Kerzen und brennenden Zigaretten fern.
- Bitte beachten Sie, dass bei einem abgeklappten Therapietisch die Feststellbremse des Rollstuhles nur schwer zugänglich ist. Möchte der Patient den Rollstuhl verlassen, so ist zunächst die Feststellbremse zu betätigen und dann erst der Therapietisch abzuklappen.



Gebrauchsanweisung



4. Lieferumfang

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 x Therapietischplatte (1) | 2 x Handräder (6) |
| 1 x Doppelrollen-Scharnier (2) | 2 x Senkkopfschrauben (7) |
| 1 x Armlehne (3) | 2 x Sicherungsmuttern (8) |
| 2 x Befestigungsschrauben (4) | 2 x Nivellierschrauben (9) |
| 2 x Unterlegscheibe (5) | |

5. Montage

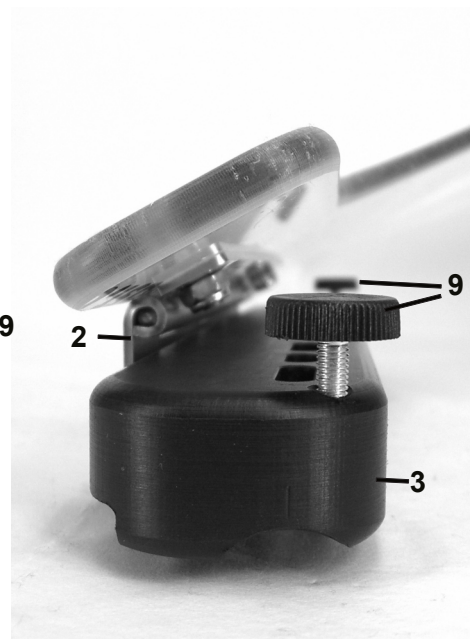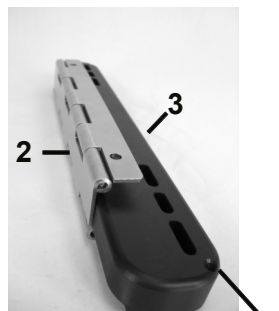

1. Vor der Montage lesen Sie sich bitte die komplette Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen und Vollständigkeit aller Teile. Die Montage am Rollstuhl muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
2. Der Therapietisch besteht aus 3 Packstücken: der Therapietisch-Platte (1), der Armlehne mit Scharnier (2 + 3) und dem Zubehörbeutel, der Schrauben, Handräder und Unterlegscheiben enthält.
3. Sorgen Sie für eine absolut saubere, möglichst weiche Montageunterlage. Denken Sie bitte daran, dass Kleinteile, Splitter, Späne und Ähnliches die Therapietisch-Platte (1) verkratzen können.
4. Entscheiden Sie zunächst, ob Sie die Therapietisch-Platte (1) linksseitig oder rechtsseitig in Fahrtrichtung des Rollstuhles einsetzen möchten. Entfernen Sie danach nur die Folie auf der Unterseite des Therapietisches.
5. Die Universal-Armlehne mit dem Doppelrollen-Scharnier (2 + 3) ist in einer mittleren Stellung bereits vormontiert. Diese wird gegen die Original-Armlehne des Rollstuhles auf der entsprechenden Seite ausgetauscht. Entfernen Sie hierzu die Original-Armlehne und ersetzen Sie diese durch die Therapietisch-Armlehne. Möglicherweise müssen Sie hierzu die Befestigungslöcher im Armlehnrohr auf 6 mm aufbohren.
6. Befestigen Sie die Armlehne mit den beigefügten Schrauben, Handrädern und eventuell Unterlegscheiben (4, 5 + 6). Durch die Langlöcher der Armlehne passt diese Lehne auf nahezu jeden Rollstuhl. Zudem ist diese durch die Langlöcher in der Tiefe verstellbar.
7. Nachdem Sie zwischen Metallrohr des Seitenteils und Therapietisch-Armlehne eine feste Verbindung geschaffen haben, montieren Sie nun mittels der beiden kurzen Senkkopfschrauben (7) und der Sicherungsmuttern (8) die Therapietisch-Platte (1) am Scharnier (2). So haben Sie eine absolut feste und perfekte Verbindung zum Rollstuhl geschaffen. Den Winkel der Therapietisch-Platte können Sie dann noch mit den Nivellierschrauben (9), die vorn und hinten in die Armlehne (3) eingesetzt werden, einstellen und den Therapietisch (1) in die Waagerechte bringen.



Gebrauchsanweisung

8. Wird der Therapietisch bei sehr schlanken oder sehr korpulenten Patienten eingesetzt, so kann dieser durch Versetzen des Scharniers (2) an der Unterseite der Armlehne (3) um weitere 9 cm in der Tiefe verstellt werden.
9. Wenn Sie den Therapietisch gemäß dieser Montageanleitung montiert haben und auch die Reinigungs- und Pflegehinweise - wie beschrieben - befolgen, werden Sie viele Jahre lang Freude an diesem praktischen Therapietisch haben.

6. Reinigung, Pflege und Wartung:

Der Therapietisch wird mit einer Lösung aus lauwarmem Wasser mit einem geringen Anteil neutraler Seife gereinigt. Verwenden Sie dafür einen weichen Schwamm oder ein Putzleder. Setzen Sie zur Reinigung keinerlei aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel und auch keine Scheuerschwämme oder Bürsten ein. Verwenden Sie kein heißes Wasser, keine Dampfreiniger, keine konzentrierten Säuren und Laugen. Die Platten sind generell beständig gegen die meisten Säuren, Alkohole und Salze, sowie gegen Weichmacher. Ebenso sind sie beständig gegen Kohlenwasserstoffe wie z.B. Xylol, Mineralöle und Erdöl. Die Festigkeit gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe ist begrenzt. Das Material ist nicht beständig gegenüber Aceton, Ammoniak, Phenol und Benzylalkohol. Die Armlehnen aus PE weisen eine exzellente chemische Beständigkeit auf gegen Säuren, Laugen, Salze und Salzlösungen, Alkohole, Öle, Fette, Wachse und viele Lösungsmittel. Gegen stark oxidierende Medien (z.B. Salpetersäure, Chromsäure oder Halogene) sind sie nicht beständig. Bei Desinfektionsmitteln beachten Sie bitte auch die Angaben des jeweiligen Herstellers.

Bewahren Sie den Therapietisch in geschlossenen Räumen auf und setzen Sie ihn keinen Temperaturen über 60 °C aus. Prüfen Sie das Produkt regelmäßig, mindestens jedoch wöchentlich, auf Beschädigungen. Achten Sie dabei besonders auf Risse in der Platte oder Beschädigungen von Armschienen oder Scharnier. Beschädigte Tische dürfen nicht mehr verwendet werden. Kleinere Kratzer in der Tischplatte können mithilfe einer Heißluftpistole von einem Fachmann entfernt werden. Zur möglichen Reparatur dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile durch einen qualifizierten Fachmann eingesetzt werden. Ein Wiedereinsatz ist möglich.

7. Technische Daten

Platte:	PET-G, 545 x 325 x 8 mm
Armlehne:	PE 500, 311 x 50 x 25 mm
Scharnier:	Edelstahl, 212 x 70 x 7 mm
Schrauben:	Stahl, verzinkt
Handräder:	Gewinde: Stahl, verzinkt, Umrandung: PA
Nivellierschrauben:	Gewinde: Stahl, verzinkt; Fuß: PE
Unterlegscheiben:	PE-HD
Gewicht:	ca. 1,82 kg

8. Entsorgung:

Größere Mengen Metall dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden. Das Edelstahlscharnier sollte der Wiederverwertung über die Wertstoffhöfe, Recyclinghöfe oder Schrottannahmestellen zugeführt werden. PET-G ist ein hochwertiger Kunststoff und recycelbar. Eine Wiederverwertung ist der Entsorgung über den Restmüll vorzuziehen. Bitte entsorgen Sie die anderen Teile des Tisches über den Hausmüll.

Die Gewährleistung für dieses Produkt auf Material- und Verarbeitungsfehler beträgt in Verbindung mit dem Kauf-/Lieferbeleg 12 Monate. **Schäden durch unsachgemäße Behandlung sind hiervon ausgenommen.** Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden MPB-Therapietisches und muss daher aufbewahrt werden. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.

Als Zubehör zu einem Medizinprodukt der Klasse I trägt dieses Produkt die CE-Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 2017/745. Dieses Produkt entspricht den auf das Produkt anzuwendenden regulatorischen Anforderungen. Bitte melden Sie im Zusammenhang mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfälle umgehend uns und den zuständigen Behörden.