

Bedienungsanleitung für ROLLSTUHLVERLADEHILFE



Die Verladehilfe hat ein Innenmaß von 94 x 43 mm. Die Griffe des zusammengefalteten Rollstuhls müssen in die Aufnahme der Verladehilfe passen, um dieses Produkt verwenden zu können.

Bedienung:

1. Falten Sie den Rollstuhl und legen Sie das Sitzkissen in den gefalteten Sitz.
2. Drücken Sie die Schiebegriffe mit einer Hand zusammen und schieben die Rollstuhlverladehilfe auf die Griffe. Durch eigenen Gegendruck der Schiebegriffe wird die Verladehilfe beim Ein- und Ausladen sicher gehalten.



3. Nun können Sie den Rollstuhl rückwärts mit der Verladehilfe auf die Ladekante Ihres Kombi-Pkws kippen, anheben und leicht in den Kofferraum rollen und verschieben.
4. Zum sicheren Transport sollten Sie den Rollstuhl möglichst im Kofferraum auf die Seite legen.
5. Zum Ausladen verfahren Sie bitte umgekehrt.

 **Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden! Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann, bzw. Kundendienst vorgenommen werden.**

Diese Anleitung ist Bestandteil einer jeden MPB® ROLLSTUHLVERLADEHILFE und muss daher aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte ist die Anleitung mitzugeben. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.