


# Montage- und Bedienungsanleitung für URINBEUTELTASCHE GROSS



1. Die Urinbeutel taschen dienen zur diskreten Aufnahme von handelsüblichen Urinbeuteln. Die Tasche ist ca. 30 x 30 cm groß.
2. Die Montage erfolgt mittels der angenähten Klettgurte am vorderen rechten und linken Rahmenrohr des Rollstuhles oder an einem anderen Stuhl an einer Stelle, die ein Rutschen nach unten verhindert.
3. Die Klettgurte werden mit den beigefügten Stegschnallen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert (Skizze).
4. Stecken Sie den Urinbeutel in die URINBEUTELTASCHE und sichern Sie den Schlauch annähernd mittig durch Zusammendrücken des Klettverschlusses, damit der Schlauch nicht abknicken kann.
5. Der gesamte Beutel ist waschbar bei 30° C und nicht trocknergeeignet. Es handelt sich um Polyester, das mit Polyurethan und Polyacryl beschichtet ist.
6. Bitte beachten Sie bei der Montage und bei der Wäsche, dass das Kletten- und Flauschband absolut geschlossen ist, da es ansonsten durch das Klettband zu Beschädigungen anderer Wäschestücke kommen kann.

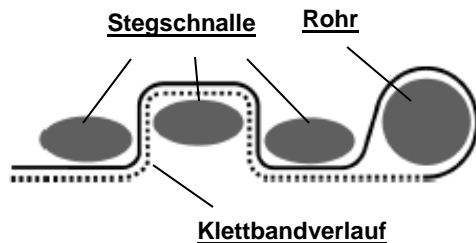

**Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden! Bitte überprüfen Sie den Zustand den Urinbeutels regelmäßig. Prüfen Sie während der Nutzung, dass der Schlauch des Urinbeutels korrekt sitzt.**

**Diese Anleitung ist Bestandteil einer jeden MPB URINBEUTELTASCHE GROSS und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.**